

## نوار تست ادرار... VEDA. LAB

- نوار ادراری vedalab ساخت کشور فرانسه ، که با بررسی ۱۱ پارامتر ( Blood ، Bilirubin ، Ascorbicacid ، Glucos ، Urobilinogen ، Specific gravity ، Protein ، PH. Nitrite، Leukocytes ، ketones ) و ۱۵۰ تست از کیفیت مناسبی برای مراحل اولیه ی آنالیز ادراری برخوردار می باشد.
- با توجه به رعایت تمام استانداردهای اروپا ، نوار ادراری vedalab دارای گواهینامه ISO و CE می باشد و همچنین مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته است.
- مدت زمان انقضاء این محصول ۲ سال پس از تولید می باشد.
- نتایج تست اطلاعات ارزنده ای را در مورد وضعیت متابولیسم کربوهیدرات ها ، عملکرد کبد و کلیه ، تعادل اسید – باز و عفونت دستگاه ادراری ارائه می دهد.
- اساس شیمیای هر پارامتر به طور کامل در بروشور داخل جعبه موجود است.
- این محصول با توجه به دامنه ی دمایی وسیع ، جهت نگهداری ، قابلیت انبارش در یخچال و انبار خشک را دارا می باشد.
- در صورتیکه در ظرف اصلی نگهداری شود تا پایان زمان انقضای درج شده در ته ظرف قابل استفاده می باشد.
- ضمن رعایت نکات کلی در مورد نحوه ی استفاده و نگهداری از نوار های ادراری توجه شما را به چند نکته مهم در این زمینه جلب می نمایم:

  ۱. پس از بیرون آوردن هر نوار از ظرف مخصوص ، بایستی ظرف مدت ۳۰ دقیقه استفاده شود.
  ۲. کم رنگ تر شدن یا پر رنگ تر شدن نوار ممکن است نشان دهنده ی تغییر کیفیت جوابدهی در آن باشد و می بایست جهت کنترل از کنترل های مثبت و منفی تجاری یا تهیه شده در آزمایشگاه بهره گرفت.
  ۳. حتما از ادرار مخلوط شده و سانتریفیوژ نشده استفاده شود.
  ۴. جهت بررسی دقیق تر پارامترهایی نظیر بیلی روبین ، اوروبیلینوزن که در معرض نور ناپایدارند و همچنین نیتريت بهترین نمونه ، نمونه ی صبحگاهی است.
  ۵. حضور مواد پاک کننده ی پوست نظیر کلرهگزیدین ممکن است روی تست پروتئین تاثیر داشته باشد.
  ۶. مدت زمان قرار دادن نوار در ظرف نمونه نبایستی بیش از ۲ ثانیه باشد.
  ۷. اضافه ادرار روی نوار را با تماس پشت نوار با لبه ی ظرف نمونه خارج کنید و نوار را به صورت افقی روی کاغذ جاذب قرار دهید.
  ۸. پس از طی زمان مناسب، نوار را در مقابل نور کافی و به صورت افقی در کنار جدول رنگی روی ظرف بخوانید .

دستور العمل کنترل کیفی و هرگونه اطلاعات تکمیلی به طور کامل در بروشور کیت موجود می باشد و در صورت نیاز کارشناسان شرکت آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.